

MANUAL DE OPERACIÓN



ÍNDICE

Instructivo de operación	2
Datos técnicos.....	5


Instructivo de operación

Coloque el equipo sobre una superficie limpia y plana, conecte el **Cable de Alimentación Eléctrica (7)** a una toma de corriente de 120 VCA. Al hacer esto deberá de escuchar un breve sonido “beep”.

Coloque el **Difusor de Ozono (5)** al recipiente de agua o a la bolsa de plástico, según sea el caso (ejemplo para pie diabético).

De acuerdo al tipo de terapia, pulse el botón **START (1)** para seleccionar el Programa Deseado.

Cada vez que pulse el botón **START (1)** se escuchará un breve sonido “beep”. 4 segundos después de la primera pulsación del botón **START (1)** comenzará la producción de ozono.

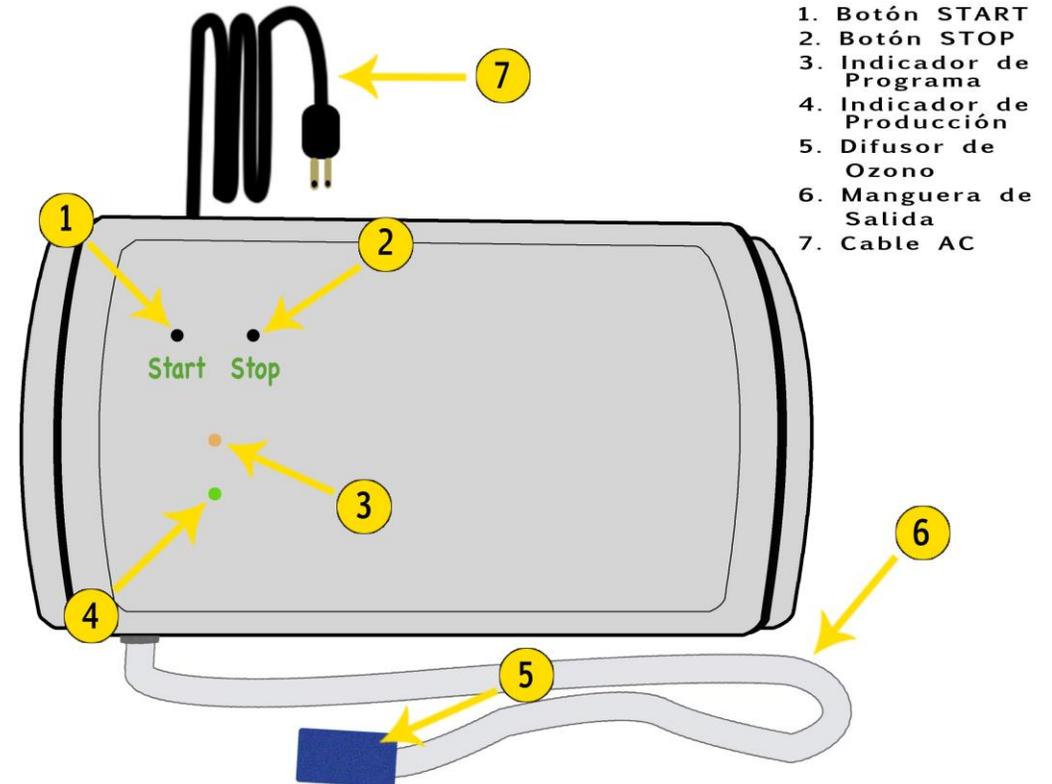

4. El **Indicador de Producción (4)** se encenderá, y la luz amarilla del **Indicador de Programa (3)** comenzará a parpadear, indicando el programa seleccionado, con un parpadeo cada dos segundos. Por ejemplo: para el *Programa 1* parpadeará una vez cada dos segundos, para el *Programa 2* parpadeará dos veces cada 2 segundos y así sucesivamente.

NOTA: El pulsar el botón START más de 4 veces no tiene efecto alguno y permanecerá el Programa 4.

5. Para detener o cambiar el tipo de *Programa*, debe de pulsar el botón **STOP (2)** y nuevamente pulsar **START (1)** el número de veces deseado (*ver paso 3*).

6. Una vez concluido el tiempo del *Programa*, sonará un “beep”, se apagará el **Indicador de Producción (4)** y se detendrá la salida de ozono.

6.1 Si se escogió el *Programa 4*, el equipo permanecerá inactivo por 5 minutos al finalizar el *Programa*, permitiendo el enfriamiento del equipo. Una vez transcurridos los 5 minutos se podrá volver a utilizar el equipo.

7. Si desea finalizar la producción de ozono antes del tiempo programado, mantenga pulsado el botón de **STOP (2)**. Al hacer esto el indicador verde del **Indicador de Programa (3)** dejará de parpadear, se escuchará un “beep” y se detendrá la producción de ozono.

8. Si se equivoca en la selección del *Programa* ó quiere modificarlo, pulse el botón **STOP (2)**, escuchará un breve sonido “beep” y regrese a la selección de *Programas*.

Tipo de Programa	Número de pulsaciones START	Tiempo de funcionamiento
Programa 1	1	8 min.
Programa 2	2	15 min.
Programa 3	3	30 min.
Programa 4	4	45 min.

DATOS TÉCNICOS

Tamaño: 25 cm x 13 cm x 6 cm

Peso: 0.95 Kg.

Alimentación: 120 VCA +- 15 %

Temperatura de Operación: 10° - 15° C

Consumo de potencia: 150 W

Producción de ozono: 300 mg/h

Concentración de ozono: 10 mg/cc

El equipo cuenta con 4 programas para diferentes terapias.

No requiere mantenimiento



Dos años de garantía